

# CoreBio NC



入針口

有效的防護  
移除尖銳的針頭  
工作安全，沒有傷害！

封條

集針盒



## Needle Collector

CoreBio NC 可分離使用過的針頭和針筒，被分離的針頭將被移除且自動掉入集針盒中，可預防非必要性的接觸和減少針頭所造成的工作傷害。

# 特色和優點



## 特點

- 自動移除針頭裝置
- 完全的分開針頭與針筒
- 無破壞性的收集器
- 安全和有效率的收集盒

## 使用方式

- 於入針口插入針頭，CoreBio NC 將會啟動
- 直立的握住針筒直到針頭脫離(~六秒或等到 CoreBio NC 完全停止)然後掉至集針盒
- 將針筒妥善處理
- 當集針盒滿時，拉住封條後再拿出來

## 規格

- 適用針頭16G ~ 25G
- 長度：16 mm ~ 50 mm
- 電壓：DC 12V
- 尺寸：148 x 160 x 211 mm+
- 重量：1.25 kg

